

ファン

介助式アルミ製車椅子 CA-40

折りたたみ方法について

※折りたたむ際に指などを挟まないようご注意ください。

※ご利用になる際は背もたれパイプをロックする、L字ストッパーのかけ忘れにご注意ください。  
危険ですので、各箇所がしっかりとロックされているか、確認した上でご利用してください。

①



肘掛部を跳ね上げます。

②



足置き部を内側に収納します。

③



背もたれパイプをロックする、L字ストッパーがあります。

④



L字ストッパーを下に向け、ロックを解除します。

⑤



座面後ろにある紐を引っぺります。

⑥



そうすることで背もたれパイプが解除され背もたれ部を倒すことができます。

⑦



内側のバーを下に押し下げます。

⑧



持ち手を持って引き上げれば、折りたたんだ状態になります。



Care-Tec  
Japan