

足軽くん CW-10 取扱説明書

保存用
保証書付

この度は弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
歩行器がお体に合わない場合は健康を損なう恐れがございますのですぐにご使用をおやめください。
※お買い上げの製品は商品の改良等よりお取扱説明書の内容と一部異なる場合がございます。
ご不明点がございましたら、まずはご購入されました販売店にご相談くださいますようお願い申し上げます。

●高さ調節の仕方

調節ボタンを押しながら
4本全てを
適度な高さに調節してください。
※必ず4本同じ高さにそろえてご使用ください。

■調節後、必ず固定されていることを
お確かめください。
※転倒・けがをする恐れがございます。
※指などを挟まないようにご注意ください。




●折りたたみの仕方

①切り替えピンを交互型の場所にお取り付けください。

②カバーを横にスライドし、
真ん中のボタンを押しながら
左右の持ち手を内側に折りたたみます。

■開く際は、必ずボタンが
固定されていることをお確かめください。
※転倒・けがをする恐れがございます。
※指などを挟まないようにご注意ください。

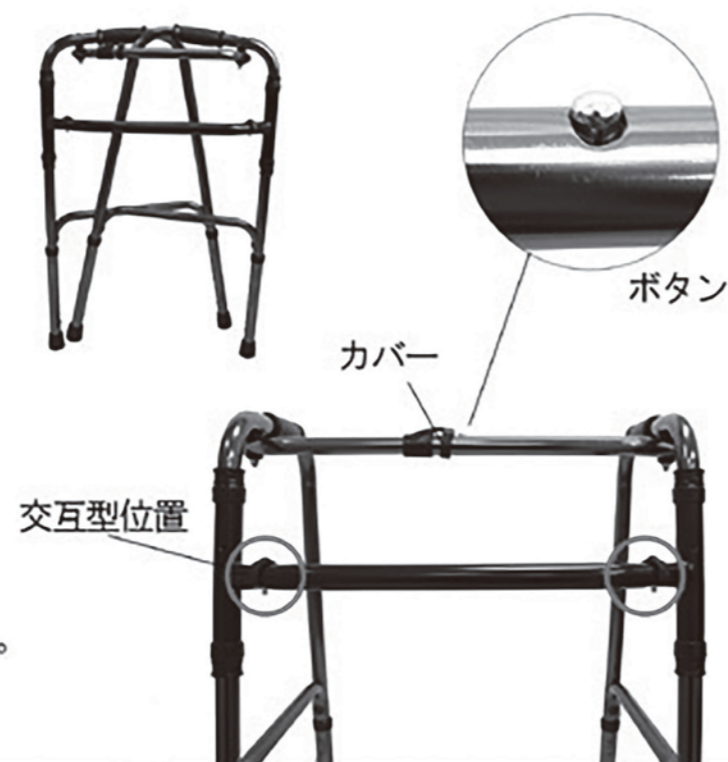

●固定型・交互型の切り替え

切り替えピン


①切り替えピンを穴に合わせ
お取り付けください。
差し込んだあと、反対側に
ピンの先が出ていることをご確認ください。
※使用の前に必ず固定されていることをご確認ください。
転倒・けがをする恐れがございます。



●固定型として使う際は



●交互型として使う際は

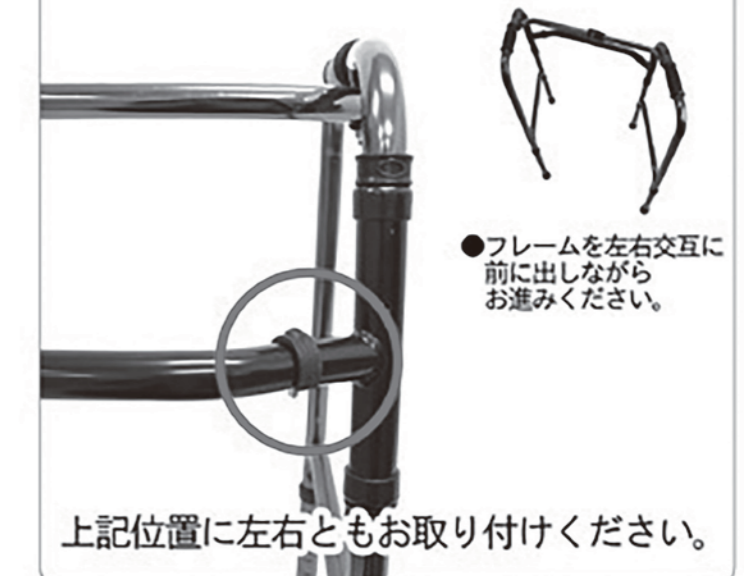

修理・お手入れ・お取扱い等のご相談は、
まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

製品保証書

品名	歩行器
品番	
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
ご住所	
お名前	



<販売元>
株式会社 ネクストケア・イノベーション
〒806-0041
福岡県北九州市八幡西区皇后崎町10番3号
mail:info@nextcare.jp

※日本国内のみ有効です。
※通信販売等でご購入いただいた場合は、保証書に日付等の記載が入らない場合がございます。
保証内容は販売店にて管理されておりますのでご安心下さいませ。